

Cultura do Trato Genital Masculino

CULTURA DO TRATO GENITAL MASCULINO

PREPARO DO PACIENTE:

Evitar o uso de antibióticos no período de 10 dias.

Orientar o paciente para não tomar banho e não urinar antes da coleta que deverá ser realizada pela manhã, antes da primeira micção, ou no mínimo 4 horas sem ter urinado.

TIPO DE AMOSTRA:

Secreção uretral

Urina – 1º jato

COLETA E CONSERVAÇÃO:

Colher dois swabs:

O primeiro introduzir no canal, fazer movimento de rotação, retirar e fazer esfregaço em duas lâminas para coloração de Gram.

O outro repetir o procedimento e ao retirar colocar em meio para transporte Amies.

Pedir ao paciente para colher em seguida, o primeiro jato de urina para pesquisa de Trichomonas e leveduras.

Amostra colhida em “swab” com meio de transporte comercial: enviar dentro de 12 horas.

MÉTODO:

VALOR DE REFERÊNCIA

Crescimento de bactérias pertencentes à microbiota uretral.

APLICAÇÕES CLÍNICAS

O exame é útil no diagnóstico das uretrites.

A interpretação dos resultados obtidos precisa ser feita com bastante critério, pois é comum nessas amostras a presença de determinados microrganismos que, muitas vezes, são somente colonizadores do trato genital, porém em situações especiais podem ser patogênicos. Assim, a interpretação dos resultados microbiológicos deve ser feita com cautela, certeza de ausência de outros patógenos potenciais e com ênfase na sintomatologia do paciente.